



产品说明

CN

FFP3级自吸过滤式防颗粒物呼吸器

产品型号: **M1300VS (1.04.019)**

M1300V (1.04.018)



颜色:

白色红阀

产品描述:

罩杯款无纺布防护口罩，采用无纺布合成纤维，TPU非乳胶密封圈，配有红色呼气阀，过滤吸收等级FFP3。每盒5只装。M1300VS为小尺码款；M1300V为大尺码款。

使用说明:

- 1.把面罩放到下巴下面，向上盖住嘴巴和鼻子。
 - 2.拿起上面一条弹性固定带，使其绕过头部，再拿起下面的固定带，使其绕过颈部。
 - 3.把准备好的口罩放在手心里，凹面向上，带子自然下垂。
 - 4.用手推压鼻子周围，以确保密封情况很好。
 - 5.用力呼气，如果没有空气从口罩周边跑出就说明密封性很好，如有必要可以反复试验以确保无误。
- 该口罩只能被使用一天。这种口罩只能使用一次（无需维护）。不可连续使用超过 8 小时，用完后要扔掉。只有在使用时才可以把口罩从包装中取出。只在污染物的浓度不产生危及生命或健康的情况下使用，并且只在符合当地健康和安全管理标准的情况下使用。在使用之前请确认其完整性，有效期（在包装盒底），以及所用口罩的等级(FFP1 / FFP2 / FFP3)或 KN90(KP90)/ KN95(KP95)/ KN100(KP100)。

禁用:

在禁止在上述规定使用说明以外的情况下使用本面罩。若发生过敏反应，请立即离开危害区域，摘掉面罩并就医治疗。

注意事项:

- 这种口罩只能使用一次（无需维护），不可连续使用超过 8 小时，用完后要扔掉。
- 只在污染物的浓度不产生危及生命或健康的情况下使用，并且只在符合当地健康和安全管理标准的情况下使用。
- 在使用之前请确认其完整性，有效期（在包装盒底），以及所用口罩的过滤效率等级
- 用环境必须通风，不缺氧（含氧量大于 19.5%），请勿在易爆环境下使用。
- 必须要保证口罩佩戴到位，以确保达到预期的保护水准。如果面部的毛发妨碍了口罩的密封性，发生漏气，请不要使用。
- 如果出现呼吸困难，头晕，身体不适等情况，请立即离开工作地点。
- 对口罩不要做任何的改动，如果已经有所破坏就报废不用。
- 本口罩不适用于毒气、蒸汽或喷漆溶液的防护。
- 不遵守使用说明会影响到使用者的身体健康，引起严重的问题，甚至有生命的危险。

储存说明:

保存在干燥通风处，避光，防冻，原包装不受破坏。

性能:

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定，并符合以下欧洲标准：EN149:2001+A1:2009(FFP3)和美标 NOISH(N99)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02